

[H Block grafik]

Humatrope®
somatropin

HUMATROPEN® 6 mg

Injektionspen til væksthormon
Injektionspen til brug med Humatrope® (somatropin) cylinderampuller



6
mg

BRUGSANVISNING TIL PENNEN

Lilly

Afsnit 1 Læs hele dette afsnit omhyggeligt før du begynder.
Fortsæt derefter til afsnit 2.

HVAD DU HAR BRUG FOR AT VIDE OM HUMATROPEN® 6 MG

Læs denne vejledning omhyggeligt FØR du bruger din HumatroPen® 6 mg. Du skal anvende pennen korrekt for at få mest gavn af behandlingen med Humatrope®. Hvis du ikke følger denne vejledning nøje, kan det resultere i, at der indsprøjtes for meget eller for lidt Humatrope.

INTRODUKTION


HumatroPen 6 mg er en injektionspen beregnet til brug med Humatrope 6 mg cylinderampuller. Din læge har fastsat den dosis af Humatrope og den pen, som du eller dit barn skal have.

DU MÅ IKKE ÆNDRE dosis eller pen, medmindre det er bestemt af din læge.

Før du bruger din HumatroPen 6 mg, skal du læse denne brugsanvisning omhyggeligt. Den forklarer pennens betjening og har en vejledning i problemløsning, hvis der opstår spørgsmål.

Denne vejledning erstatter ikke en samtale med din læge eller sygeplejerske om din sygdom eller din behandling. Hvis du har spørgsmål eller problemer med at bruge din HumatroPen 6 mg, skal du kontakte din læge eller sygeplejerske eller Eli Lilly (se sidste side for kontaktinformation).

VIGTIG INFORMATION OM HUMATROPEN 6 MG

- Når du ser  i denne brugsanvisning, skal du være ekstra opmærksom.
- BRUG IKKE pennen, hvis en del af den eller cylinderampullen ser ud til at være itu eller beskadiget. Kontakt din læge eller sygeplejerske.
- Du skal sikre dig, at du har en 6 mg Humatrope cylinderampul som passer til HumatroPen 6 mg. BRUG DEN IKKE hvis den ikke passer og kontakt din læge eller sygeplejerske.

- Følg KUN afsnit 2 ved klargøring af en ny cylinderampul før første anvendelse.
- Afsnit 3 i denne brugsanvisning skal følges ved hver indsprøjtning.
- LAD IKKE ANDRE bruge din HumatroPen 6 mg eller nåle pga. risiko for at overføre smitte.
- HumatroPen 6 mg bør ikke anvendes af blinde eller svagtseende uden hjælp af en seende person, som er trænet i at bruge den.

OM INJEKTIONSNÅLE

Hvilken slags nåle kan bruges sammen med HumatroPen 6 mg?

- Injektionsnåle medfølger ikke. Nåle kan fås på apoteket.
- BD-nåle (Becton, Dickinson and Company) er anbefalet til brug med HumatroPen 6 mg.
- HumatroPen kan bruges med eller uden nåleskjuleren. Hvis nåleskjuleren bruges sammen med HumatroPen skal nålen være mindst 5 mm lang. Se venligst brugsanvisningen til nåleskjuleren.
- Spørg din læge eller sygeplejerske, om hvilken nåletykkelse og længde, som er bedst egnet til dig.

Skal der bruges en ny nål ved hver indsprøjtning?

- Ja, der skal bruges en ny nål ved hver indsprøjtning.
- Fjern straks nålen efter hver indsprøjtning. Brug en ny nål til hver indsprøjtning. Det vil minimere risikoen for infektion, forhindre udsivning af Humatrope, holde luftbobler ude, og reducere tilstopning af nålen.

Hvordan kasserer jeg brugte nåle?

- Bortskaf brugte nåle som foreskrevet af din læge eller sygeplejerske.

RENGØRING OG OPBEVARING AF HUMATROPEN 6 MG

Rengøring

- Snavsede dele kan renses med en fugtig klud. BRUG IKKE sprit eller andre rengøringsmidler.
- LÆG IKKE PENNEN I BLØD, og nedsænk den ikke i væske.
- ANVEND IKKE olie eller andre smøremidler.

Opbevaring


- Opbevar HumatroPen 6 mg med fastgjort Humatrope cylinderampul i etuiet i køleskabet, indtil det er tid til næste indsprøjtning. MÅ IKKE NEDFRYSES.
- Læs venligst indlægssedlen til Humatrope cylinderampullen for nærmere vejledning i opbevaring.
- Lad HumatroPen 6 mg med fastgjort Humatrope cylinderampul ligge ved stuetemperatur i 10 minutter før indsprøjtning. Du kan få ubehag på injektionsstedet, hvis Humatrope indsprøjtes kold.
- Daglig opbevaring ved stuetemperatur bør ikke overstige 30 minutter.
- OPBEVAR IKKE pennen med fastgjort nål.

UDSKIFTNING


Brug ikke din pen i mere end 3 år efter første gang den er taget i brug, eller efter udløbsdatoen på kartonen, alt efter hvad der kommer først. Noter her den dato pennen blev brugt første gang: __ / __ / __. Kontakt din læge eller sygeplejerske, hvis du har behov for en ny HumatroPen 6 mg, eller når pennen har været brugt i 3 år.

Se venligst den komplette Humatrope indlægsseddel. For yderligere information, kan du kontakte din læge eller sygeplejerske eller Eli Lilly (se sidste side for kontaktinformation) eller gå ind på hjemmesiden www.eli-lilly.dk.

DELE TIL HUMATROPEN 6 MG

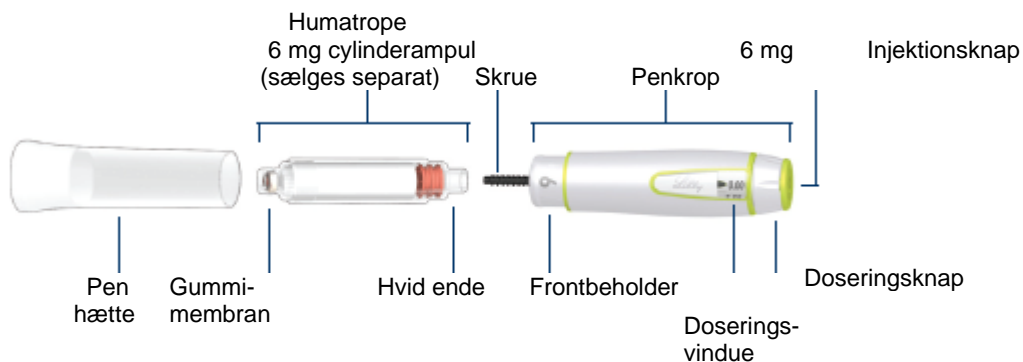

DELE TIL INJEKTIONSNALE (NÅLE MEDFØLGER IKKE)

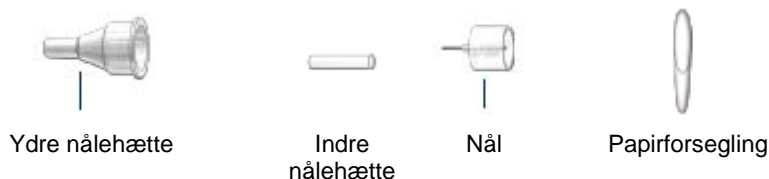

Afsnit 2 Læs og følg først anvisningerne i dette afsnit, når du har læst afsnit 1.

KOM I GANG

Sørg for at følge anvisningerne for tilberedning (blanding) som beskrevet i Humatrope cylinderampulkit. Udfør kun klargøring af en ny cylinderampul én gang ved starten af en ny cylinderampul. **GENTAG IKKE** klargøring ved daglig brug. Hvis du gør det, kan din Humatrope slippe op for tidligt.

KLARGØRING AF NY CYLINDERAMPUL

TRIN A - KONTROLLER PEN OG CYLINDERAMPUL



Sørg for at kontrollere cylinderampullen:

- For 6 mg cylinderampuletiket
- For udløbsdato
- Indholdet skal være klart og uden partikler



Træk penhætten af.



Se på injektionsknappen og frontbeholderen for at sikre, det er en 6 mg Pen.

BEMÆRK

BRUG IKKE pennen, hvis en del af den eller cylinderampullen ser ud til at være itu eller beskadiget. Kontakt din læge eller sygeplejerske.



KONTROLLER

Kontroller at tallet på frontbeholderen svarer til styrken på cylinderampuletiketten. Hvis pennen og cylinderampullen ikke har samme tal, skal du


kontakte din læge eller sygeplejerske.

TRIN B - FASTGØR CYLINDERAMPULLEN



Brug den hvide ende af cylinderampullen til at skubbe skruen tilbage.

Skub den hvide ende af en tilberedt cylinderampul ind i penkroppen. Skru 6 mg penkroppen på cylinderampullen indtil den er fastgjort.

 **KONTROLLER**
Se på injektionsknappen, frontbeholderen og cylinderampuletiketten for at sikre, det er en 6 mg pen.



BEMÆRK

Skruen er måske ikke ude når du får pennen.

BEMÆRK

Hvis cylinderampullen ikke er fastgjort fuldstændigt, kan skruen måske ikke bevæge sig, og en ukorrekt dosis gives muligvis.

TRIN C - SÆT NÅLEN PÅ

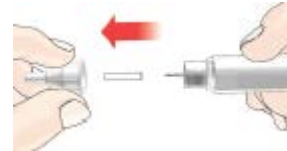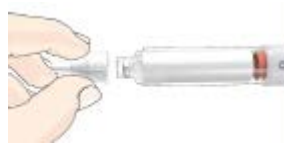


Fjern papirforseglingen fra enden af den ydre nålehætte.

Skub nålen **lige** på 6 mg cylinderampullen og skru med uret indtil den er fastgjort.

- Træk den ydre nålehætte og den indre nålehætte af.
- Behold den ydre nålehætte til at fjerne nålen med efter din indsprøjtning.

TRIN D – FJERN LUFT FRA EN NY CYLINDERAMPUL

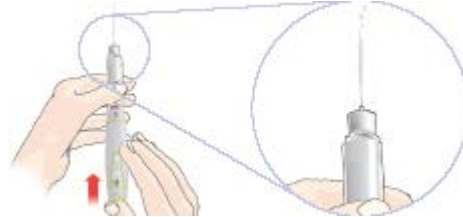

Indstil på 1.25 mg.

- Hold nålen lige opad.
- Tryk injektionsknappen ind og hold den inde i fem sekunder.
- Indstil på 0.05 mg og gentag disse tre trin, indtil du ser en væskestrøm.

BEMÆRK

- Pennen skal klargøres før den første dosis indsprøjtes fra hver ny 6 mg cylinderampul.
- Klargøring af den nye cylinderampul er vigtig for at fjerne store luftbobler, som kan forekomme efter tilberedning (blanding).
- Hvis der ikke ses en strøm efter flere forsøg, skal du kontakte din læge eller sygeplejerske eller Eli Lilly (se sidste side for kontaktinformation).


TRIN E – FORTSÆT TIL DAGLIG BRUG

- GENTAG IKKE klargøring af cylinderampul før hver dosis.
- Lad cylinderampullen forblive fastgjort i pennen, og FJERN DEN IKKE, før cylinderampullen er tom.
- Gå til afsnit 3, trin 3 for at få anvisning på, hvordan du indsprøjter den første dosis.

Afsnit 3 Du skal følge afsnit 3 ved alle dine indsprøjtninger, nu hvor du har udført klargøringen af cylinderampullen. Klargøringen skal kun udføres én gang.

DAGLIG BRUG

TRIN 1 – KONTROL AF PENNEN

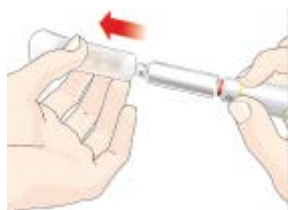

Træk penhætten af.



Sørg for at kontrollere cylinderampullen:

- For 6 mg cylinderampuleetiket
- For udløbsdato
- Indholdet skal være klart og uden partikler



Se på injektionsknappen og frontbeholderen for at sikre, det er en 6 mg Pen.

BEMÆRK

BRUG IKKE pennen hvis en del af den eller cylinderampullen ser ud til at være itu eller beskadiget. Kontakt din læge eller sygeplejerske.




KONTROLLER

Kontroller at tallet på frontbeholderen svarer til cylinderampulstyrken på cylinderampuleetiketten. Hvis pennen og cylinderampullen ikke har samme tal, skal du kontakte din læge eller sygeplejerske.


TRIN 2 – SÆT NÅLEN PÅ



- Fjern papirforseglingen fra enden af den ydre hætte.

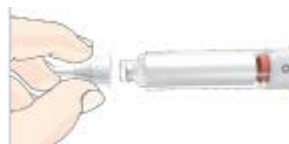

Skub nålen **lige** på 6 mg cylinderampullen og skru den på med uret, indtil den er fastgjort.

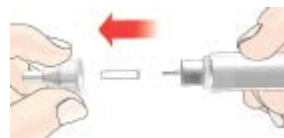

- Træk den ydre og den indre hætte af.
- Behold den ydre hætte til at fjerne nålen med efter din indsprøjtning.

BEMÆRK

HumatroPen kan bruges med eller uden nåleskjuleren. Hvis nåleskjuleren bruges sammen med HumatroPen skal nålen være mindst 5 mm lang. Se venligst brugsanvisningen for nåleskuleren.

TRIN 3 – INDSTIL OG INDSPRØJT DOSIS



Drej doseringsknappen til den ønskede dosis.

EKSEMPEL

0.25 mg er vist på tegningen ovenfor.

Hvis du drejer forbi den ønskede dosis, kan du korrigere dosis ved at dreje tilbage.

Doseringsknappen klikker når du drejer den. IINDSTIL IKKE din dosis ved at tælle klik, fordi dette kan give en forkert dosis.



Indsæt nålen som du er instrueret i af din læge eller sygeplejerske.

Placér din tommelfinger på injektionsknappen, tryk derpå langsomt og bestemt injektionsknappen ind, indtil den stopper med at bevæge sig.

Fortsæt med at holde injektionsknappen inde i **fem** sekunder, og fjern derpå nålen fra huden.

Husk at kontrollere, at du ser **0.00** i doseringsvinduet for at sikre, at du har fået hele din dosis.



BEMÆRK

Det er muligt at indstille en større dosis, end den mængde Humatrope der er tilbage i cylinderampullen.

Ved afslutningen af en indsprøjtning, skal tallet i doseringsvinduet være **0.00**. Hvis det ikke er det, viser tallet den mængde Humatrope, som du **IKKE** har fået.

Tal med din læge eller sygeplejerske om, hvordan du håndterer en delvis dosis. Fjern nålen og den tomme cylinderampul.

Til efterfølgende daglig brug skal du fastgøre en ny cylinderampul som vist i afsnit 2, trin A, og fortsætte med Klargøring af ny cylinderampul (afsnit 2).

TRIN 4 – FJERN OG KASSÉR NÅLEN



Sæt forsigtigt den ydre nålehætte på igen som din læge eller sygeplejerske har vist dig.



Fjern den tildækkede nål ved at dreje mod uret.

- Kassér brugte nåle i en lukbar beholder til spidse genstande. Kassér ikke nåle direkte i affaldsspanden.
- Genbrug ikke den fyldte beholder.
- Spørg din læge eller sygeplejerske om, hvordan du bortskaffer den fyldte beholder.



Sæt penhætten på igen.

BEMÆRK

- **OPBEVAR IKKE** pennen med en fastgjort nål – dette er med til at forhindre, at der kommer luft ind i cylinderampullen.
- **FJERN IKKE** cylinderampullen fra pennen før cylinderampullen er tom eller skal udskiftes – dette er med til at undgå muligheden for en unøjagtig dosis.

TRIN 5 – OPBEVARING AF PEN OG CYLINDERAMPUL TIL NÆSTE BRUG

Opbevar HumatroPen 6 mg korrekt. (Se "Rengøring og opbevaring af HumatroPen 6 mg" i afsnit 1 af denne brugsanvisning for mere information.)

Når det er tid til din næste dosis, fortsæt til afsnit 3 og gentag trin 1 -5.

Afsnit 4

OFTE STILLEDE SPØRGSMÅL

1. Skal jeg udføre klargøring af ny cylinderampul før hver dosis?

- Nej. Klargøring af ny cylinderampul skal kun udføres én gang for hver cylinderampul, lige før en ny cylinderampul anvendes første gang.
- Formålet med klargøringen er at sikre, at HumatroPen 6 mg sammen med Humatrope 6 mg cylinderampul er klar til brug.
- Hvis du gentager klargøring af ny cylinderampul før hver sædvanlig dosis, kan du hurtigt løbe tør for Humatrope. Den lille mængde der anvendes til klargøring af ny cylinderampul, vil ikke påvirke tilførslen af Humatrope.

2. Hvad skal jeg gøre, hvis cylinderampuletiket og pen ikke passer sammen?

- **BRUG IKKE** pennen hvis cylinderampulstyrken på Humatrope cylinderampuletiketten ikke er den samme som tallet på pennens frontbeholder.
- Kontakt din læge eller sygeplejerske for at få hjælp eller for at få en erstatning.

3. Hvad skal jeg gøre, hvis Humatrope ikke er klar efter blanding?

- Sørg for at vende pennen forsigtigt op og ned 10 gange. **RYST IKKE.** Lad derpå pennen hvile i mindst tre minutter. Hvis opløsningen forbliver uklar eller indeholder partikler, så vend pennen forsigtigt op og ned yderligere 10 gange. Lad pennen hvile i fem minutter mere.
- Hvis opløsningen forbliver uklar eller indeholder partikler efter tilberedning (blanding), **BRUG DEN IKKE.** Kontakt din læge eller sygeplejerske for hjælp.

4. Hvorfor er der luftbobler i cylinderampullen?

- Luftbobler kan forblive i cylinderampullen efter tilberedning (blanding).
- Hvis pennen er opbevaret med en fastgjort nål, kan der dannes luftbobler i cylinderampullen.
OPBEVAR IKKE pennen med en fastgjort nål.
- Udfør klargøring af ny cylinderampul for at fjerne luftbobler fra cylinderampullen.
- En lille luftboble er normal. Det vil ikke skade dig eller påvirke dosis.

5. Hvorfor kommer skruen ikke ud, når der ingen cylinderampul er fastgjort til pennen?

- Skruen kommer ikke nødvendigvis ud, når du trykker på injektionsknappen, medmindre der er en cylinderampul i pennen. Denne egenskab gør, at du let kan skubbe skruen ind i penkroppen, ved udskiftning af en cylinderampul.

- Når en cylinderampul er fastgjort, vil skruen komme ud, når injektionsknappen trykkes ind.

6. Hvad skal jeg gøre, hvis jeg ikke kan fastgøre cylinderampullen til penkroppen?

- Kontroller at cylinderampullen ikke er itu eller beskadiget.
- Sæt forsigtigt cylinderampullen op mod penkroppen og skru sammen, indtil den er fastgjort. Hvis cylinderampullen og pennen ikke kan skrues sammen, så kontakt din læge eller sygeplejerske.

7. Hvorfor er det svært at trykke injektionsknappen ind, når jeg forsøger at indsprøjte min dosis?

- Nålen kan være tilstoppet. Prøv at sætte en ny nål på.
- Hvis injektionsknappen trykkes ind hurtigt, kan det gøre injektionsknappen sværere at trykke ind. Ved at trykke injektionsknappen langsommere ind, kan det gøres lettere.
- Ved at bruge en nål med større diameter, f.eks. en 12,7 mm nål (diameter 0,33 mm) vil det blive lettere at trykke injektionsknappen ind under indsprøjtningen. Spørg din læge eller sygeplejerske om, hvilken nål der passer dig bedst.
- Injektionsknappen kan blive hårdere at trykke ind, hvis indersiden af din pen er snavset til med Humatrope, mad, drikke eller andet.

8. Hvorfor stiller doseringsknappen sig ikke på nul, når jeg indsprøjter min dosis?

- Dette kan ske, hvis Humatrope cylinderampullen ikke har nok Humatrope tilbage til den fulde dosis. Det er muligt at indstille en større dosis end den mængde Humatrope, som er tilbage i cylinderampullen. Ved afslutningen af indsprøjtningen, skal tallet i doseringsvinduet være 0.00. Hvis det ikke er det, viser tallet den mængde Humatrope som du IKKE har fået. Tal med din læge eller sygeplejerske om, hvordan du skal håndtere en delvis dosis. Fjern nålen og den tomme cylinderampul. Fastgør en ny cylinderampul til efterfølgende daglig brug som vist i afsnit 2, trin A, og fortsæt med Klargøring af ny cylinderampul (afsnit 2).

9. Hvorfor ser jeg Humatrope lække fra nålen, efter jeg har afsluttet indsprøjtningen?

- Det er normalt, at en enkelt dråbe er tilbage på spidsen af nålen, efter indsprøjtningen er færdig. Hvis du ser mere end en dråbe:

- Du har måske ikke fået den fulde dosis. **INDSPRØJT IKKE** en ny dosis. Kontakt din læge eller sygeplejerske for at få hjælp.

- For at undgå dette ved din næste dosis, så tryk bestemt, hold injektionsknappen inde og tæl langsomt til **fem** (se afsnit 3, trin 3).

10. Hvordan kan jeg vide, hvornår indsprøjtningen er færdig?

- Indsprøjtningen er færdig, når:
 - Du langsomt har talt til fem, mens du stadig holder injektionsknappen inde, og før du fjerner nålen fra huden.

OG

- **0.00** er i midten af doseringsvinduet.

Lokal dansk kontakt: Eli Lilly Danmark A/S, Tlf: +45 45 26 61 00, e-mail: denmark@lilly.com.

CE
0344

Importør:
Lilly S.A.
Avda. de la Industria 30
28108 Alcobendas
Madrid, Spanien

Eli Lilly and Company
Pharmaceutical Delivery Systems
639 S Delaware St.,
Lilly Corporate Center, Indianapolis,
IN 46285, USA

EC REP
Eli Lilly Nederland B.V.
Papendorpseweg 83
3528 BJ Utrecht
Holland

Humatrope® og HumatroPen® og H Block designs er varemærker som tilhører Eli Lilly and Company.

HumatroPen® 6 mg opfylder nuværende nøjagtighed for dosis og funktionelle krav i ISO 11608-1 og er kun til brug sammen med Humatrope 6 mg cylinderampuller
--

© 2008, 2019 Eli Lilly and Company. Alle rettigheder forbeholdes.

Denne vejledning blev senest revideret: Februar 2019